

Gebrauchsanweisung Kühlpad

Das Kühlpad für mindestens 1–2 Stunden in den Kühlschrank legen. Den Kaiserschlüpfer anziehen und das Kühlpad in die vorgegebene Tasche einfügen.

Hinweise

Das Kühlpad nie direkt auf die Haut legen, sondern nur in Verbindung mit dem Kaiserschlüpfer verwenden. Ein beschädigtes Kühlkissen nicht mehr benutzen, sondern mit dem Restmüll entsorgen. Der Inhalt ist nicht giftig.

Hergestellt in Deutschland für:

Kaiserschlüpfer GmbH
Müllenhoffweg 27
22607 Hamburg

LOT: 20-46895